

Avfallshåndtering på reise

Når du reiser, er avfallshåndtering ditt ansvar

- Dialysevæskeposer og tømmeposer skal tømmes for rester av væske og deretter kastes i samsvar med lokale lover.
- Dette betyr vanligvis at disse produktene blir kastet sammen med vanlig søppel.
- Noen områder er i stand til å resirkulere materialene. Du bør sjekke resirkuleringsnettsteder på reisemålet ditt.



På slutten av reisen kan du ha PD-utstyr til overs. Du kan enten ta det med deg hjem eller kaste det.
Baxter tar ikke ubrukt utstyr i retur

- Ubrukte engangsprodukter som APD-slangesett, beskyttelseshetter osv. skal kastes i samsvar med lokale lover. Vanligvis betyr dette at de bare kastes sammen med vanlig avfall.
- Ubrukte dialysevæskeposer skal tømmes først, og deretter kasseres i samsvar med lokale lover.
- For å tømme, bryter du forseglingen til dialysevæskeposen, fjerner beskyttelseshetten på koblingen og legger posen i vasken, badekaret eller dusjen for å la den renne av.
 - Alternativt kan du kutte posen og tømme ut løsningen.

Baxter henter ikke ubrukt utstyr. Det er ditt ansvar å kaste brukt eller ubrukt utstyr fra dine reiser.